


WatchPAT™ ONE komplektācija:

1. Secīga instrukcija
2. WatchPAT™ ONE ierīce - ar pirksta sensoru (1) un krūšu sensoru (2)*
3. AAA baterija (3)

*Krūšu sensors nav iekļauts ierīces WatchPAT™ ONE E komplektācijā

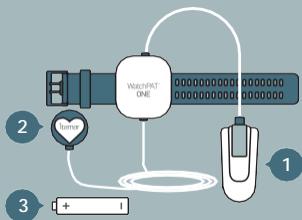

Pirms WatchPAT ONE lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus:

Lejupielādējiet lietotni WatchPAT ONE savā viedtālrunī (pieejama Apple App Store vai Google Play Store).

Piezīme: Lietotne WatchPAT ONE ir piemērota mobīlajām ierīcēm. Pārliecinieties, ka jums ir četrciparu kods ierīces aktivizēšanai.

- Novelciet ciešu apģērbu, gredzenus, pulksteņus un citas rotaslietas.
- No testējamā pirksta noņemiet nagu laku un mākslīgos nagus, nāgam ir jābūt īsi apgrieztiem.
- Ierīce ir jāvelk uz nedominējošās rokas, pirksta sensoru var piestiprināt pie jebkura pirksta, izņemot īkšķi.

Piezīme: Ierīces uzvilkšanas laikā var būt nepieciešama pieaugušā palīdzība.

Ierīces lietošana:

Sagatavojieties testa veikšanai:

- Gādājiet, lai testēšanas laikā tālrunis būtu pieslēgts pie strāvas padeves.
- Telpā izslēdziet visas nevajadzīgas ierīces, jo tās var traucēt testēšanu.

- Tālrunī atveriet lietotni WatchPAT ONE.
- Bateriju ievietojiet ierīcē tikai tad, kad esat gatavs/-a doties pie miera.
- Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, kas palīdzēs izpildīt darbības testa veikšanai.

Piezīme: Laikā, kad iestatāt ierīci WatchPAT ONE testa veikšanai, tālrunim ir jābūt nodrošinātai piekļuvei internetam.

Kad testēšana ir pabeigta:

1. Piespiediet taustiņu STOP RECORDING (pabeigt ierakstīšanu) lietotnē WatchPAT ONE un izpildiet norādījumus.
2. Ja lietotne ir aizvērta, atveriet to un pārliecinieties, ka tālrunim ir izveidots savienojums ar internetu, pagaidiet, līdz parādīsies paziņojums „Thank You” (paldies).
3. Kad lietotnē parādās paziņojums „Thank You” (paldies), noņemiet ierīci.

Piezīme: Tikai tad, kad lietotnē parādās paziņojums „Thank You” (paldies), tests ir pabeigts, un to var nosūtīt ārstam.



Svarīgas piezīmes:

- Uzglabāšanas un ekspluatācijas temperatūra no 0°C līdz 40°C
- Nemēģiniet pievienot vai atvienot nevienu ierīces daļu.
- Nebāziet ierīcē svešķermeņus.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet novērst problēmas patstāvīgi.



Saskaņā ar EEIA Direktīvu 2012/19/ES visi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) ir jānodod atsevišķi, un tos nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Utilizējiet šo ierīci un visas tās daļas atbilstīgā un videi draudzīgā veidā.



Šis izstrādājums ir marķēts ar CE logo 2797 BSI



Autorizētais pārstāvis Eiropas Kopienā



Medicīnisku ierīču ražotājs



Kataloga numurs



Sērijas numurs



Ražošanas datums



Derīguma termiņš



Uzmanību: Federālie likumi ierobežo šādas ierīces pārdošanu licencētiem veselības aprūpes speciālistiem vai pēc to rīkojuma



Vienreiz lietojams, nelietot atkārtoti



Temperatūras ierobežojums 0°C - 40°C



Skatīt lietošanas instrukciju

1.5V DC

Akumulatora darba spriegums

IP22

Aizsardzības klase

FCC ID

Federālās sakaru komisijas identifikācijas numurs



BF tipa piemērotā daļa